

Brugervejledning MyTime

Varenummer: 92-8036

HMI: 83875



billede af urets forside



Billede af urets bagside

My Time har 10 forskellige sprog:

Svensk, dansk, norsk, finsk, polsk, tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk.

Urets forside:

Øverst på den buede top er et øje til at fastgøre halssnor.

På urets front er højtaleren samt en stor grå taleknap.

Urets bagside:

Her finder du fire flade knapper lodret placeret i venstre side.

Knap 1 (Øverste knap) "hængelås" anvendes ved indstilling af uret.

Knap 2 "Hour" - Time indstilling

Knap 3 "Minute" - Minut indstilling

Knap 4 (Nederste knap) "Day/Language" anvendes til indstilling af ugedag og sprog

Mellem knap 4 og batterikammer er en skjult "Reset" knap som kun kan aktiveres med en spids genstand. Denne knap bør kun bruges hvis der er behov for at få uret sat tilbage til fabriksindstillinger.

Nederst på bagside er batterikammer.

Højre langside af uret:

Øverst finder du lydindgang for tilslutning af hovedtelefoner via jackstik.

Rulleknappen på siden bruges til at regulere lydstyrken.

På venstre langside af uret er en stik tilslutning for fjernstyringsknap. Ekstra udstyr som kan tilkøbes.

Sådan indstiller du sproget:

Tryk og hold knap 1 og 4 (hængelås og day/language) inde samtidig i 7 sekunder indtil uret begynder at tale. Hold fortsat knap 1 (hængelås) inde samtidig med at du med knap 4 kan trykke frem til det sprog du ønsker. Slip begge knapper og tryk herefter på urets store grå taleknap på fronten. Nu er uret indstillet på ønskede sprog



Indstilling af timer, minutter og ugedage:

Indstilling af timer: Tryk og hold knap 1 inde (hængelås) Nu kan du ved tryk på knap 2 (Hour) indstille det aktuelle timetal. Afslut med tryk på den store grå taleknap på urets front.

Indstilling af minutter: Tryk og hold knap 1 inde (hængelås) Nu kan du ved tryk på knap 3 (Minute) indstille det aktuelle minuttal. Afslut med tryk på den store grå taleknap på urets front.

Indstilling af ugedag: Tryk og hold knap 1 inde (hængelås) Nu kan du ved tryk på knap 4 (day/language) indstille aktuelle ugedag. Afslut med tryk på den store grå taleknap på urets front.

My Time kan sige tiden både digitalt og (analog) på "gammeldags" måde eksempel:

Digitalt: Klokken er 14:10

Analog: Klokken er ti minutter over to om eftermiddagen.

For at skifte mellem digital og analog tid, skal du indstille timer. Når du passerer kl. 00.00 vil uret skifte mellem digital og analog tid.

Hvis du har spørgsmål til uret eller vejledningen kan du kontakte os på tlf. 98 95 42 44 eller hfh@synsnerven.dk